



GUÍA PARA
EL PACIENTE




TelePatch™

Sistema de Monitoreo TelePatch
Guía para el Paciente

El Sistema de Monitoreo
Cardíaco Ambulatorio más
Avanzado y Práctico

Contenido de la Caja

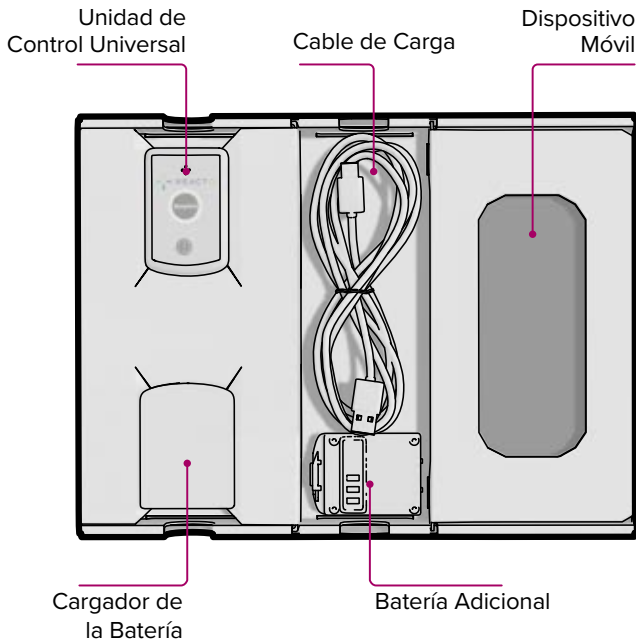

Busque los Parches de Electrodo Dentro de la Caja



ESPAÑOL

Encuentra Esta Guía en Español
[ReactDx.com/es/GuiaTelePatch](https://reactdx.com/es/GuiaTelePatch)

Índice

Bienvenido a TelePatch	2
Contenido del Kit de Monitoreo TelePatch	3
Preparación de la Piel.....	4
Colocación del Dispositivo.....	5
Comienzo del Estudio	6
Inicio del Dispositivo Móvil	7
Guía de Luz y Sonido.....	8
Reemplazo del Parche de Electrodo.....	9
Cambio y Carga de la Batería	10
Ducha y Secado	11
Qué Hacer y Qué No Hacer	12
Registro de Síntomas.....	13
Resolución de Problemas.....	14
Conexión del Monitor a Una Red Wi-Fi	16
Instrucciones para Finalizar el Procedimiento	17
Devolución del Kit de Monitoreo	Contraportada



Bienvenido a TelePatch

El sistema de monitoreo cardíaco más avanzado

Su doctor le ha indicado un estudio de monitoreo cardíaco ambulatorio para el cual usará el Monitor TelePatch de ReactDx.


Esta guía le explicará cómo conectar el monitor, cómo usarlo durante sus actividades cotidianas, cómo registrar los síntomas cuando ocurran y cómo devolverlo al finalizar el estudio. Este estudio registrará la actividad eléctrica de su corazón y le ayudará a su doctor a encontrar irregularidades cardíacas, denominadas “arritmias”.

Los registros de ECG se envían a ReactDx, donde técnicos cardíacos certificados y altamente capacitados analizan los datos del ECG y generan informes para su doctor. Debe colocarse el monitor y realizar sus actividades diarias con normalidad; incluso puede ducharse con el dispositivo. Si en algún momento percibe algún síntoma o latido irregular del corazón, simplemente presione la tecla “Symptom” (síntoma). Es un proceso simple y no debe interferir en sus actividades diarias.


Comience a usar el monitor de inmediato; deberá llevarlo puesto las 24 horas del día durante el plazo que dure el estudio que se le ha indicado. Las instrucciones incluidas en esta Guía para el paciente le explicarán cómo usar el monitor. Al finalizar el estudio, quítese el dispositivo y siga las instrucciones para devolverlo sin demora.

**Si tiene alguna pregunta luego de leer esta guía,
contáctese con ReactDx al 877-996-5553.**


Contenido del Kit de Monitoreo TelePatch

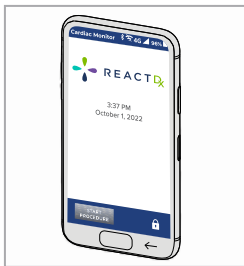


Dispositivo Móvil

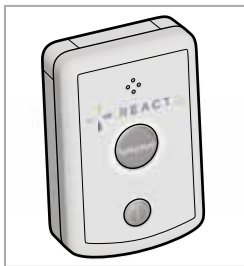


Unidad de Control
Universal

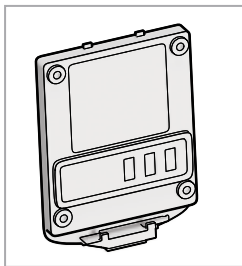

Batería(s)

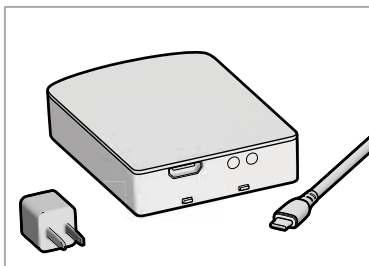


Cargador de la Batería, Cable de
Carga y Enchufe

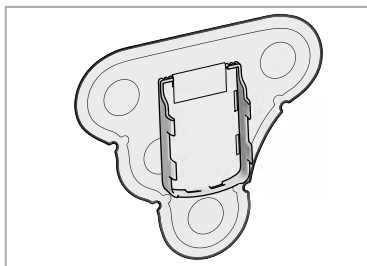


Parche(s) de Electrodo(s)


Preparación de la Piel

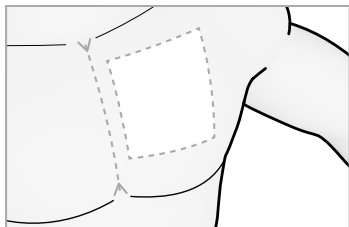


1 Encuentre la Ubicación.

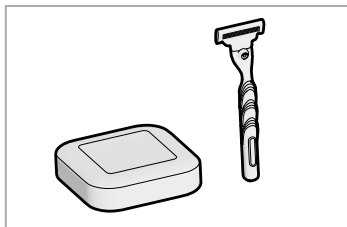

2 Lave la Zona con Jabón Común (Sin Loción/Aceite), Rasure y Seque.

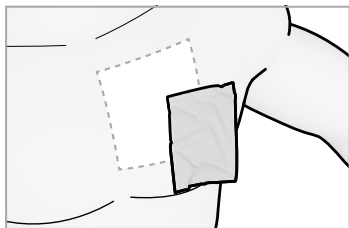


3 Limpie la Zona con el Paño De Protección Cutánea.

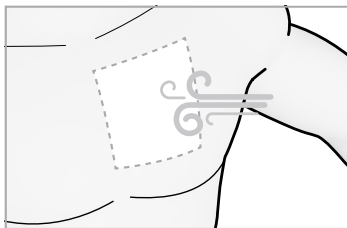

4 Deje Secar 60 Segundos.

! El parche debe ubicarse a la izquierda del centro del tórax, como se indica. Todos los materiales utilizados son libres de látex e hipoalergénicos. El paño de protección cutánea está incluido en el empaque del parche. Si sabe que tiene sensibilidad cutánea, contáctese con su médico.


Colocación del Dispositivo

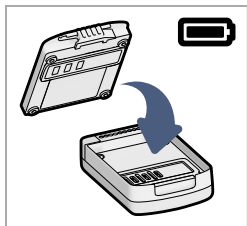


5 Inserte la Batería.




6 Inserte la Unidad de Control.

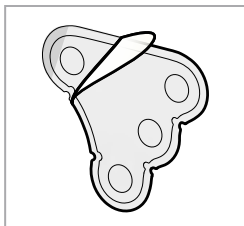

7 Despegue la Cubierta del Dorso.

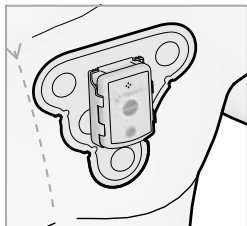

8 Adhiera al Tórax.

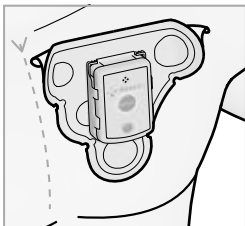

9 Quite Las Pestañas.



No Mueva el Parche
Hacia la Zona del
Hombro





Alinee el parche justo a la izquierda del centro de su pecho. Evite el pliegue de su hombro. Tenga cuidado de no colocar la unidad de control al revés. Asegúrese de que el extremo ligeramente curvo de la unidad de control —el extremo inferior que se encuentra debajo del botón de encendido— esté pegado a la parte redondeada correspondiente del soporte.

Comienzo del Estudio



Luz Intermitente

Siga estos Pasos
Después de
Colocar el Parche
de Electrodo Esté
Adherido al Tórax
en la Posición
Correcta.

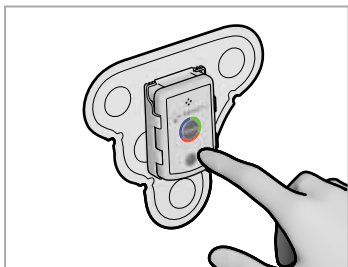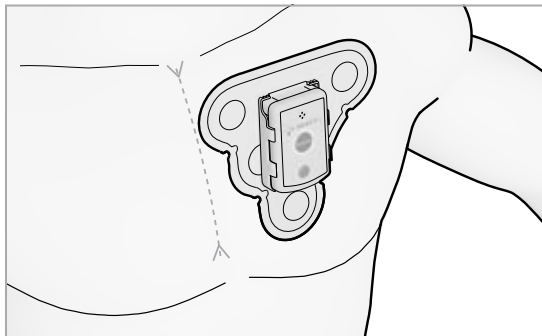

1 Encienda la Unidad de Control Universal.




2 La Luz Verde Parpadea Cada 4 Segundos.




Confirme que la luz verde parpadee lentamente. La luz verde indica que la unidad de control está encendida y realizando el monitoreo, pero no se comunica con el dispositivo móvil. La unidad de control se comunica con el dispositivo móvil cuando este está encendido y se encuentra cerca (6-10 pies) de la unidad de control.


Inicio del Dispositivo Móvil

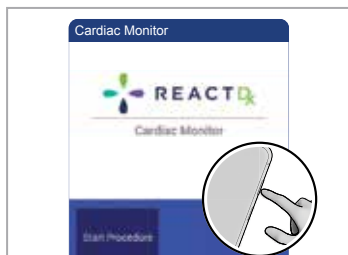


- 1** Encienda el Celular Presionando la Tecla de Encendido. Toque Iniciar Procedimiento.

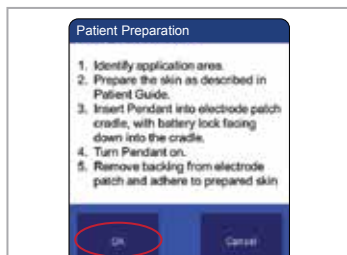

- 2** Siga Todos los Pasos de Preparación del Paciente Detallados en las Páginas 4, 5 y 6, y Toque OK.

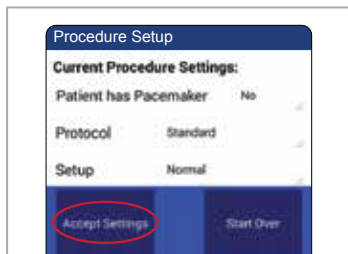

- 3** Toque Aceptar Configuración en la Pantalla de Configuración del Procedimiento

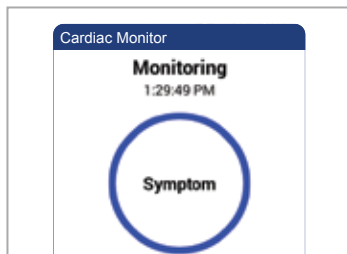


- 4** Su procedimiento se está ejecutando cuando aparece el botón de Symptom.

! Una vez que el dispositivo móvil se haya encendido y conectado a la unidad de control, la luz AZUL de la unidad de control parpadeará lentamente, lo cual indica que la unidad de control está realizando el monitoreo y está comunicada con el dispositivo móvil de forma correcta.


Guía de Luz y Sonido




Luz Intermitente

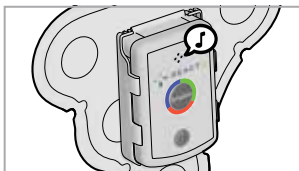


Encendido

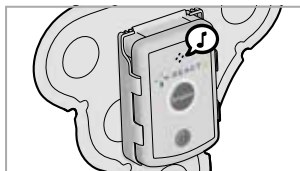


Apagado

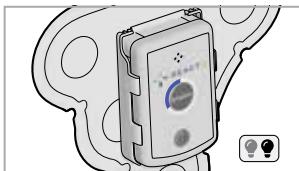


Monitoreando – Bien

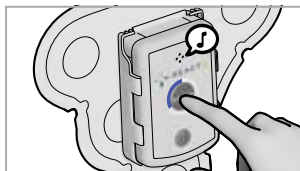

Activación del Botón “Symptom”

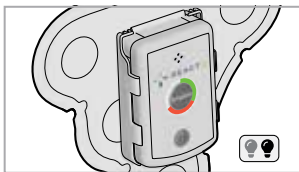

Verifique Unidad de Control

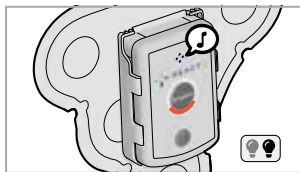

Cambie la Batería



AZUL

Luz Intermitente

Monitoreando correctamente y hay comunicación con el dispositivo móvil.

VERDE

Luz Intermitente

Monitoreando correctamente, pero no hay comunicación con el dispositivo móvil.

NARANJA

Luz Intermitente

Cambie la batería.


Reemplazo del Parche de Electrodo




1 Quite el Parche.




2 Quite la Unidad de Control.

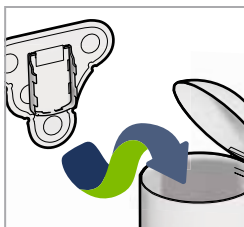


3 Descarte Solo el Parche.

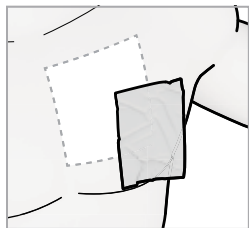

4 Limpie la Zona con el Paño de Protección Cutánea.

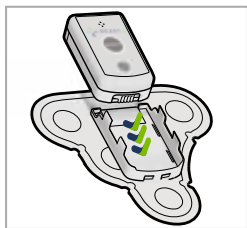

5 Inserte la Unidad e Control.

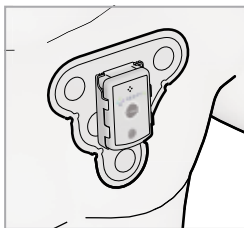


6 Coloque en el Tórax y Asegúrese de que la Unidad de Control Esté Encendida.

! Los suministros que contiene su kit deberían durar hasta el final del estudio. Si necesita ayuda o más suministros, comuníquese con Soporte al Paciente de ReactDx al (877) 996-5553.


Cambio y Carga de la Batería




Luz Intermitente

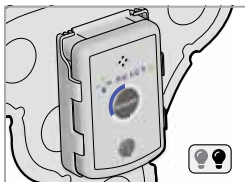


Batería Cargada y
Monitoreando.

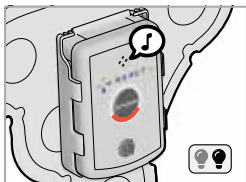


Batería Baja.

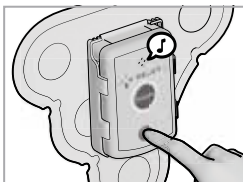


1 Apague el Aparato.

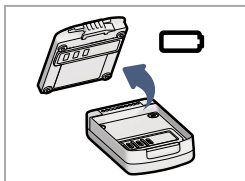


2 Extraiga la Batería
de la Unidad.

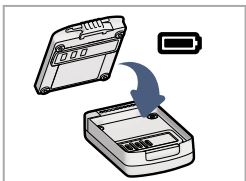


3 Coloque la Batería
en la Unidad.

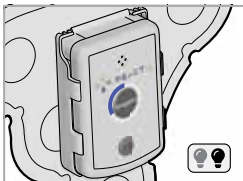


4 Inserte la Unidad.
Asegúrese de que
Esté Encendida.

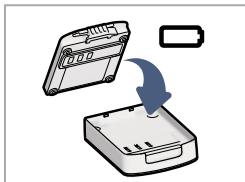

5 Coloque la Batería
en el Cargador.

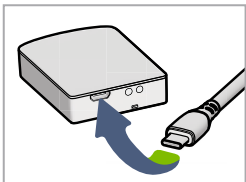


6 Conecte el Cable
al Cargador y a
un Tomacorriente.

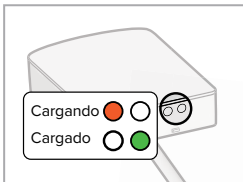

7 Verifique las
Luces.


Ducha y Secado

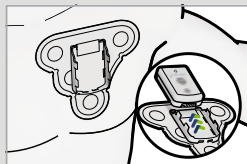

Extraiga la
Unidad de Control




Déjesela Puesta
Durante la Ducha

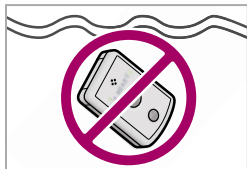


No la Sumerja




1 Después de la
Ducha, Quite la
Unidad le Control.

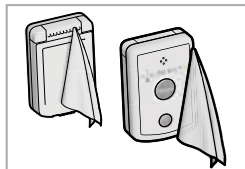

2 Seque la Parte
Anterior y Posterior
de la Unidad.

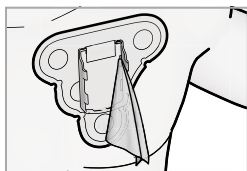

3 Seque la parte
Interior del
Soporte.

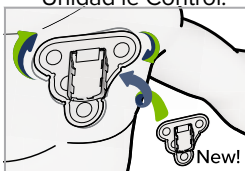


4 Si el Parche
Está Flojo,
Reemplácelo.




5 Inserte la Unidad y
Asegúrese de que
Esté Encendida.

! La unidad de control es resistente al agua, pero los accesorios no lo son. Tome precauciones para evitar que el cargador y el cable se humedezcan.

Qué Hacer y Qué No Hacer

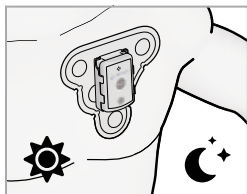


Utilice en el Día y la Noche.

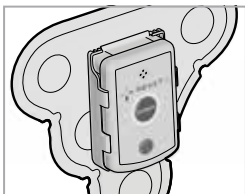


Inserte Totalmente en el Soporte.




No Descarte la Unidad de Control.

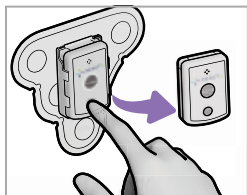

Apáguelo Antes de Cambiar la Batería.

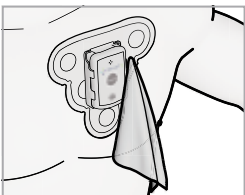


Seque la Unidad de Control y el Parche.

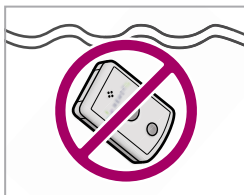

No lo Sumerja.



Mantenga el Dispositivo Móvil Cerca.

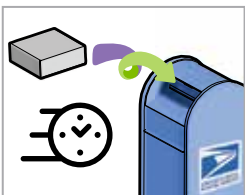


Devuélvalo Sin Demora - Deje el Kit en Cualquier Buzón de USPS Para que el Cartero lo Recoja.




No Mueva el Parche Hacia la Zona del Hombro.

Registro de Síntomas

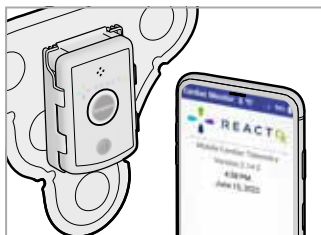


- 1 Cuando Perciba Un Síntoma, Presione el Botón “Symptom” en la Unidad o en el Dispositivo Móvil.

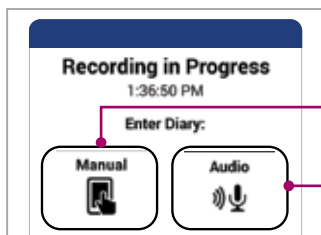

- 2 Presione la Opción “Manual” o “Audio” para Registrar los Datos del Síntoma.



Toque la Opción “**Manual**” y, de los Tres Menús Desplegables, Seleccione sus Síntomas, Ubicación y Actividad. para Terminar Presione “Save”.

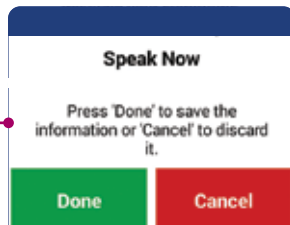

Toque la Opción “**Audio**” y Hable con Claridad al Micrófono del Dispositivo Móvil y Describa sus Síntomas, Ubicación y Actividad. Toque la Opción “Done”.


- ! Recuerde: cada vez que perciba un **síntoma**, **presione el botón “Symptom”** que se encuentra en la **unidad de control** o el **dispositivo móvil**, y **registre qué sentía y qué estaba haciendo**.

Resolución de Problemas


El texto resaltado en AMARILLO en su dispositivo móvil requiere su atención. Por favor siga estas simples instrucciones para regresar a monitoreo completo.



1 Mantenga Pulsado "POWER OFF" en la Pantalla.

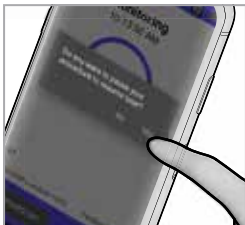


2 Toque "Yes" y Espere Hasta que Aparezca el Apagado Solicitado por el Usuario.

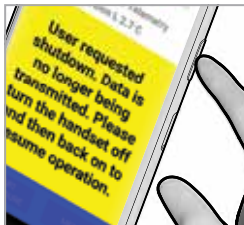


3 Mantenga Presionado el Botón de Encendido.



4 Toque "Power Off".

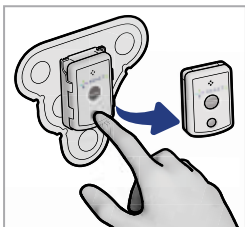


5 Apague y Retire la Unidad de Control.

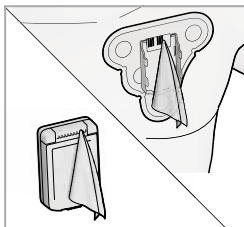


6 Limpie en el Interior las Conexiones de la Base y las Clavijas de Conexión de la Unidad.




Este Proceso Resuelve Los Problemas Más Comunes. Si, Al Realizar Este Proceso, Su Problema No Se Resuelve, Visite www.ReactDx.com/troubleshooting

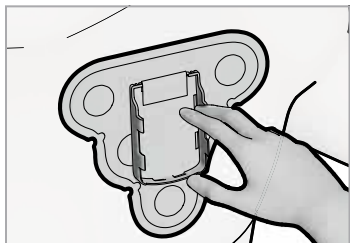


7 Asegúrese que el Parche esté Asegurado al Pecho Presionando el Interior de la Base.

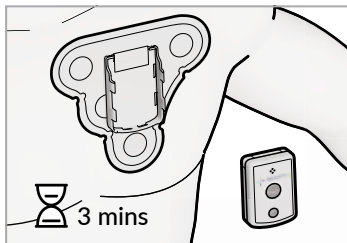

8 Espere 3 Minutos.

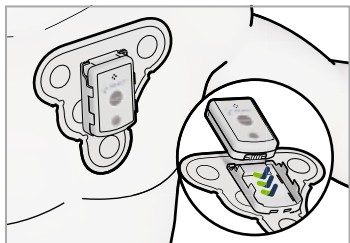

9 Inserte la Unidad de Control y Encienda.

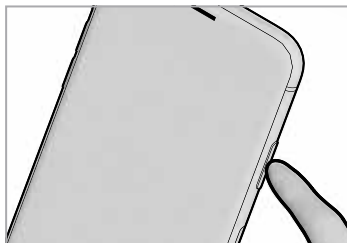


10 Encienda el Dispositivo Móvil.

! Si no puede resolver un problema y necesita ayuda en el caso de que aparezcan otros mensajes en carteles amarillos, llame a **ReactDx al (877) 996-5553** o chatee con nosotros en línea en **www.ReactDx.com**.


Conexión del Monitor a Una Red Wi-Fi



- 1** Toque el Símbolo Wi-Fi en la Parte Superior de la Pantalla de Inicio.

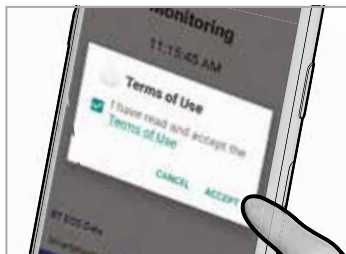

- 2** Lea y Acepte los Términos de Uso.

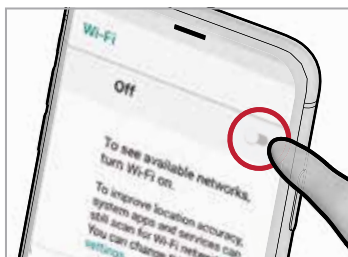


- 3** Ponga la Llave de Wi-Fi en la Posición "On" y Seleccione su Red.



- 4** Ingrese su Contraseña, Presione Conectar y Verifique su Conexión.

! Su monitor cardíaco se conectará automáticamente a una red celular. Sin embargo, si elige conectar su monitor a una red Wi-Fi, eso ayudará a que los datos recopilados se transmitan con rapidez a nuestros centros de monitoreo cardíaco.


Para Finalizar el Procedimiento

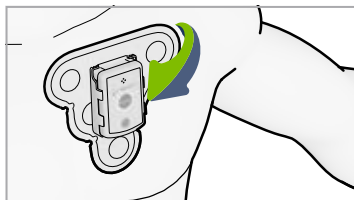


1 Quítese del Tórax el Parche con la Unidad.




2 Extraiga la Unidad de Control.

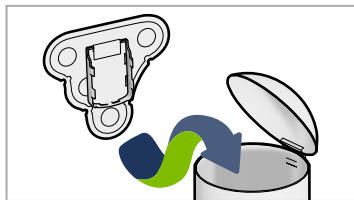


3 Descarte Solamente el Parche.

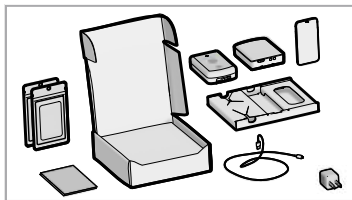

4 Coloque Nuevamente en la Caja Todos los Contenidos / Suministros Sin Usar.

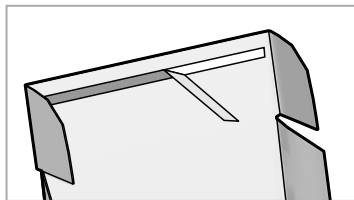


5 Cierre y Selle la Caja.

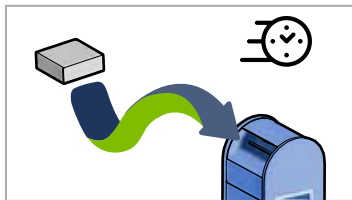

6 Déjela de Inmediato en Cualquier Buzón de USPS.

Devolución del Kit de Monitoreo

Devuelva el kit de inmediato de manera que su doctor pueda finalizar su estudio. Los dispositivos no devueltos podrían retrasar la entrega a su doctor, generar una factura por los equipos no devueltos, y demorar la ayuda a los pacientes siguientes.

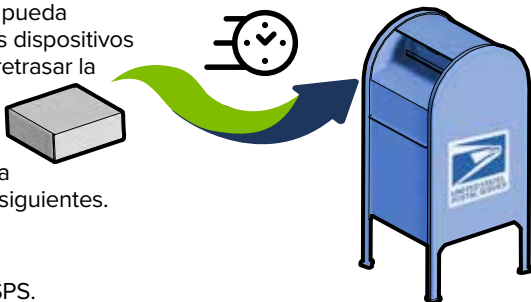

Deje el kit sellado en cualquier buzón de USPS.

Por favor,
tómese un momento
para completar la
encuesta en
[ReactDx.com/survey/](https://reactdx.com/survey/).
Sus comentarios nos
ayudarán a brindarles a
pacientes como usted
la mejor experiencia
posible.



(877) 996-5553 • www.ReactDx.com • Info@ReactDx.com

©2023 Medicomp, Inc. dba ReactDx



QSGSR00724-01